

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЭЯКУЛЯЦИЯ

Методика применения аппарата магнитофотобаротерапии «АндроСПОК»

Рекомендуемая длительность курса – 10-12 сеансов. Длительность процедуры – первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в один цикл (10 минут), остальные – продолжительностью в два цикла (20 минут) с изменением цвета оптического воздействия после первого цикла.

Баровоздействие во время каждого цикла осуществляется интервально. В течение первого сеанса время поддержания вакуума в колбе должно быть равно длительности перерыва и составлять около 30 секунд. К последнему сеансу время поддержания вакуума в колбе увеличивается до 40-50 секунд, а перерыв между воздействиями сокращается до 10-20 секунд.

К – красный.

И – инфракрасный.

Ж – желтый.

Схема применения:

| Число сеансов / Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Продолжительность лечебного сеанса (число циклов) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Выбор света во время 1-го цикла | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И | К+И |
| Выбор света во время 2-го цикла | – | – | Ж+И | Ж+И | Ж+И | Ж+И | Ж+И | Ж+И | Ж+И | Ж+И | – | – |

Для лечения преждевременной эякуляции, вызванной воспалительными явлениями, может быть применена методика проведения сеанса, как для воспалительных заболеваний (см. методику применения аппарата при лечении хронического простатита).

Первые 4 – 5 сеансов проводятся ежедневно, а остальные – с перерывами в 1 – 2 дня (в среднем 3 раза в неделю).