

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МУЖСКОЙ СФЕРЫ

Методика применения аппарата магнитофотобаротерапии «АндроСПОК»

Рекомендуемая длительность курса – 10-12 сеансов. Длительность процедуры – первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в один цикл (10 минут), остальные – продолжительностью в два цикла (20 минут) с изменением цвета оптического воздействия после первого цикла.

Баровоздействие во время каждого цикла осуществляется интервально. В течение первого сеанса время поддержания вакуума в колбе должно быть равно длительности перерыва и составлять около 30 секунд. К последнему сеансу время поддержания вакуума в колбе увеличивается до 40-50 секунд, а перерыв между воздействиями сокращается до 10-20 секунд.

К – красный.

И – инфракрасный.

З – зеленый.

Методика применения:

Число сеансов / Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продолжительность лечебного сеанса (число циклов)	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Выбор света во время 1-го цикла	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И	К+И
Выбор света во время 2-го цикла	–	–	З+И	З+И	З+И	З+И	З+И	З+И	З+И	З+И	–	–

При использовании аппарата с целью профилактики застоя крови в малом тазу рекомендовано проведение курсов по 10-12 сеансов, по 2-3 сеанса в неделю.